


EAC

NUGA
www.nuga.kr



NM-30

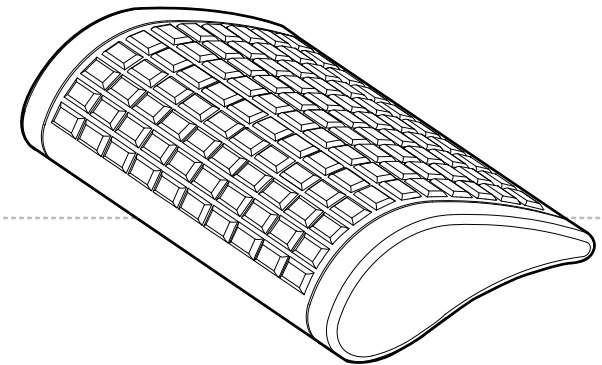

Руководство пользователя

Благодарим за покупку!

Перед использованием полностью прочтите данное руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

Изделие из турмания

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**



185, Джиреул-ро, Джиджеонг-мьеон,
Вонджу-си, Гангвон-до, Корея

ТЕЛ.: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007

www.nuga.kr



RUSSIAN / 1pcs / ATYPE / Rev. 04
2016.08.22

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**

Содержание / Меры предосторожности

Информация о продукте и его использование

Основные части изделия	4
Характеристики и методы применения продукта	5
Хранение и уход за изделием после использования	6


Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте содержание данного раздела руководства.
- Указанная информация необходима для безопасности пользователя и предотвращения имущественного ущерба.


Примечания

- Производитель продукта, импортер и продавец не несут ответственность за поломки и разного рода ущербы, возникающие из-за неосторожной эксплуатации, невнимательности при использовании или неправильного ухода за оборудованием со стороны пользователя.
- Руководство составлено на базе спецификации данной модели. Производитель продолжает совершенствование продукта и доработку его функций, что означает модификацию определенных характеристик в будущих моделях и разработку соответствующего руководства. Все изменения осуществляются без предупреждения пользователя.

⚠ Предупреждение

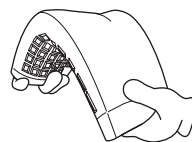

Во избежание поломок не используйте изделие в согнутом виде.

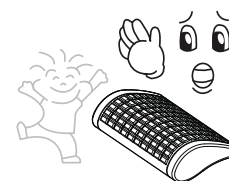


Не допускайте использование оборудования несовершеннолетними детьми без присмотра взрослого.




Не использовать продукцию в других целях кроме указанных.



Не ставьте на изделие зажженные свечи и сигареты, спиртное, электроприборы и любые легковоспламеняющиеся вещества или предметы, а также емкости с водой.

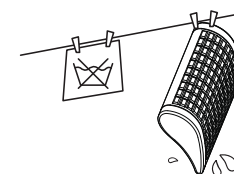

Во избежание поломок изделия не стирайте и не сдавайте изделие в химчистку.

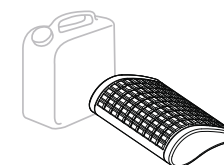


Не протирайте продукт бензолом и т.п. (Может вызвать изменение цвета, коррозию поверхности.)


⚠ Внимание



Строго соблюдайте инструкции по использованию

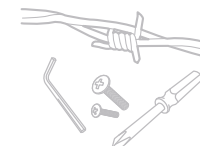

Не кладите на изделие колющие и режущие предметы.

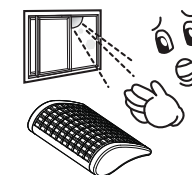


Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

i Указание


Проверьте, нет ли дефектов или поврежденных частей продукции, перед ее использованием.

При обнаружении дефектов, обратитесь к продавцу.

В целях повышения эффективности изделия дизайн или часть характеристик могут быть изменены.

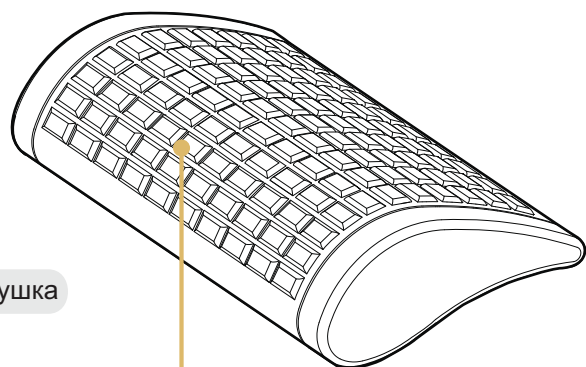


Подушка

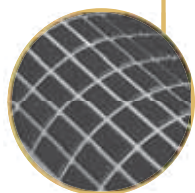

Турманий




Руководство пользователя

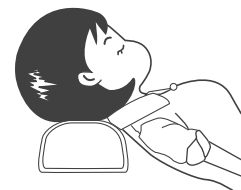

Жёсткая, высокая подушка



В этом положении подбородок находится очень высоко

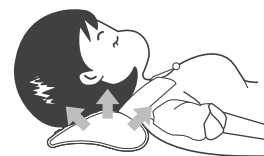

Турманиевая подушка
НУГА

Турманий

Турманиевая керамика, образованная из смеси турмалина, эльвана, германия и вулканической породы.

Хранение и уход за изделием после использования


i Указание

1. Условия хранения
 - ① Хранить в сухом помещении, удаленном от источников воды и влажности.
 - ② Изделие должно быть защищено от вибрации, ударов, падений и т.п.
 - ③ Запрещается устанавливать в местах хранения химических веществ, образования газа и т.п.
 - ④ Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
2. Комплектующие хранить в чистом месте.

Требования к окружающим условиям

·Хранить при температуре: -25~70°C; влажность: 20~80%.

Правила ухода за изделием

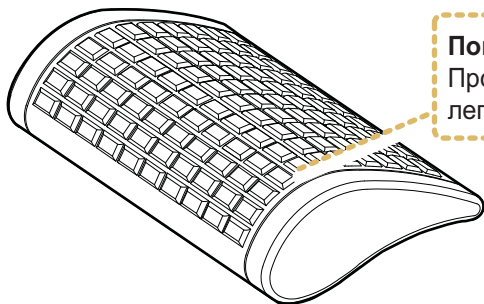

Поверхность подушки
Протирать сухой тряпкой
легкими движениями.

Наименование и тип изделия	NM-30
Производитель	(АО) «Нуга Медикал» 185, Джиреул-ро, Джиджеонг-мьеон, Вонджу-си, Гангвон-до, Корея
Вес изделия	1.36 кг
Технические характеристики	400 X 198 X 85 мм

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	Наименование продукта		Серийный номер	
			Модель	
Производитель	Гарантийный период	1 года с момента приобретения	Дата приобретения	
	Место приобретения		Телефон	
Продавец	Подпись		Печать	
Покупатель	ФИО			
	С правилами эксплуатации и гарантии ознакомлен			подпись покупателя

- * Пожалуйста сохраните гарантийный талон.
 - Вы можете получить обслуживание только при предоставлении гарантийного талона с указанием даты и места приобретения.
 - * NUGA MEDICAL CO.,LTD. обеспечивает гарантию на указанное изделие в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
 - * В случае неисправности обратитесь по месту приобретения или к ближайшему дистрибьютору NUGA MEDICAL CO.,LTD.
 - * NUGA MEDICAL CO.,LTD. обязуется осуществлять обеспечение запчастями указанного изделия в течение трех лет с момента окончания его производства.
 - * Покупая продукцию, убедитесь, что в талоне указан адрес приобретения.
1. NUGA MEDICAL CO.,LTD. гарантирует качество изделия в течение двух лет с момента приобретения. Вы можете получить бесплатное гарантийное обслуживание в случае соблюдения правил эксплуатации.
 2. Гарантийный период назначается с момента приобретения. Удостоверьтесь, что в гарантийном талоне проставлена дата приобретения.
 3. Если изделие, предназначенное для личного (домашнего) применения, используется в коммерческих целях (бизнес) или в ненадлежащих условиях эксплуатации, а также в промышленном производстве, то срок гарантии сокращается до шести месяцев с момента приобретения (включая основные детали).
 4. Гарантия не имеет силы, если гарантийный талон утерян или испорчен, если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение.
- Бесплатное гарантийное обслуживание не обеспечивается в следующих случаях:**
- * Если неисправность наступила в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, землетрясение, ураган, наводнение и т.д.).
 - * В случае износа запчастей в результате использования.
 - * В результате использования электропитания, отличного от указанного в спецификации изделия, либо в результате повреждения соединительных проводов.
 - * Если неисправность явилась следствием внешнего воздействия, а не результатом брака изделия.
 - * Если неисправность произошла по причине ремонта или попытке модификации изделия кем-то, кто не является представителем дистрибьютора или техником службы поддержки NUGA MEDICAL CO.,LTD.

NUGA MEDICAL CO.,LTD.
www.nuga.kr

EAC

185, Джиреул-ро, Джиджеонг-мьеон,
Вонджу-си, Гангвон-до, Корея
ТЕЛ: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007